

Wahrnehmungs-Trennschärfe-Test WTT (EFI-EKI-Test)

Dieser Prüfschritt untersucht die Wahrnehmungs-Trennschärfe, also die Fähigkeit, einzelne, ähnlich klingende Phoneme sicher voneinander zu unterscheiden. In diesem Prüfschritt werden die acht kritischen Konsonanten (B – D – F – G – K – P – T – W) untersucht.

Der Test besteht aus zwei Teilen. Wenn der Klient im Teil 1 sechs oder mehr Fehler gemacht hat, stoppt der Prüfer den Test. Es ist davon auszugehen, dass der Klient im zweiten Teil noch schlechter abschneiden würde. Wenn er 10 oder mehr richtige Antworten gegeben hat, sollte der Test weiterlaufen.

Für die Auswertung dieses Prüfschrittes ist vordergründig die Anzahl der richtigen Paare im zweiten Teil wichtig. Der erste Teil wird nur dann zur Grundlage der Auswertung, wenn der zweite Teil nicht durchgeführt wurde.

Die Daten in den folgenden Tabellen wurden in einer Untersuchung von 603 Schulkindern ermittelt.

Erläuterung zum Lesen der folgenden Tabellen:

1. Führen Sie den ersten Teil des WTT und gegebenenfalls den zweiten durch.
2. Wählen Sie die dem Alter des Kindes entsprechende Tabelle.
3. Suchen Sie in dieser Tabelle den vom Kind erreichten Wert und finden rechts daneben die erreichte Prozentrangstufe.

Als Lesehilfe sind in dieser Werteliste die Durchschnittswerte (PRS 50) sowie Referenzwerte (PRS 80) besonders markiert. Letztere (PRS 80) sollten als realistische Trainingsziele angestrebt werden.

Beispiel:

Ein neunjähriges Kind hat beim WTT 1 27 richtige erreicht. Dies entspricht dem Prozentrangstufen-Wert „70“. Das heißt: 69 % der neunjährigen Kinder erreichten diesen Wert nicht, 30 % der Kinder waren besser.

Prozentrangstufen Wahrnehmungs-Trennschärfe-Test nach Warnke® (WTT):

Prozentrangstufen: **Sechsjährige**

WTT – Teil 1	
Wert	PRS
30	100
27	90
26	80
24	70
23	60
23	50
22	40
20	30
19	20
18	10

WTT – Teil 2	
Wert	PRS
12	100
8	90
6	80
5	70
4	60
4	50
3	40
3	30
2	20
1	10

Prozentrangstufen: **Siebenjährige**

WTT – Teil 1	
Wert	PRS
32	100
28	90
27	80
26	70
24	60
23	50
23	40
22	30
20	20
19	10

WTT – Teil 2	
Wert	PRS
13	100
10	90
9	80
7	70
6	60
5	50
4	40
3	30
2	20
1	10

Prozentrangstufen: **Achtjährige**

WTT – Teil 1	
Wert	PRS
32	100
29	90
28	80
26	70
25	60
24	50
23	40
22	30
21	20
20	10

WTT – Teil 2	
Wert	PRS
16	100
12	90
10	80
9	70
8	60
7	50
6	40
5	30
4	20
3	10

Prozentrangstufen: **Neunjährige**

WTT – Teil 1	
Wert	PRS
32	100
30	90
28	80
27	70
26	60
25	50
24	40
24	30
23	20
22	10

WTT – Teil 2	
Wert	PRS
15	100
13	90
11	80
10	70
9	60
8	50
7	40
6	30
5	20
4	10

Prozentrangstufen: **Zehnjährige**

WTT – Teil 1	
Wert	PRS
32	100
31	90
29	80
28	70
27	60
27	50
26	40
25	30
23	20
22	10

WTT – Teil 2	
Wert	PRS
16	100
14	90
12	80
11	70
10	60
10	50
9	40
8	30
6	20
5	10